

### 安全にお使いいただくために


この度は「アルミ製 台車・車椅子・バイク用段差解消スロープ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書には、正しい取扱方法と使用上の注意事項を記載しております。ご使用前に必ずお読みになり、正しくお使いください。


製品名	長さ	均等荷重限度
アルミ製 台車・車椅子・バイク用段差解消スロープ 122cm	122cm	300kg
アルミ製 台車・車椅子・バイク用段差解消スロープ 91cm	91cm	
アルミ製 台車・車椅子・バイク用段差解消スロープ 60cm	60cm	
アルミ製 台車・車椅子・バイク用段差解消スロープ 45cm	45cm	

### 使用方法

- ① スロープを設置したい場所に上端部を5cm以上掛けます

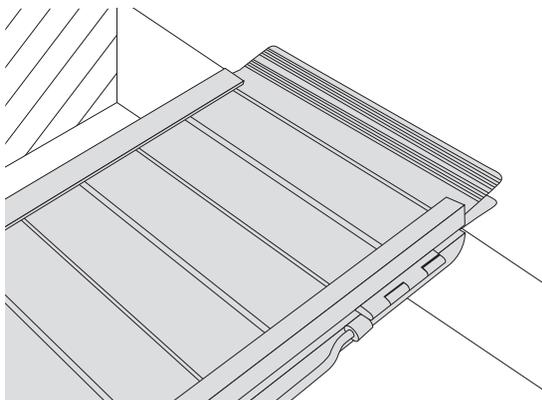

- ② ニつ折りの片面を引き上げて開いてください

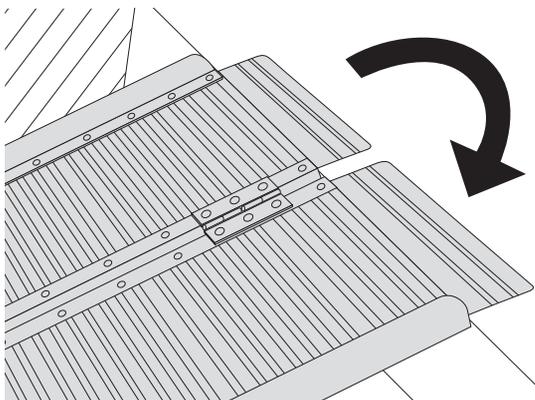

**⚠ 設置後、必ずズレ・がたつきのないことを確認し、使用してください。**



## 適用段差

スロープの勾配が急になると、車椅子の使用者や介助者にも危険が及びます。  
段差の高さやご使用になる状況にあわせてスロープをお選びください。

製品名	目安設置角度	自分で走行する場合 (約5°)	介助者同伴の場合 (約10°)	最大段差 (約15°)
アルミ製 台車・車椅子・バイク用段差解消スロープ 122cm		9cm	17cm	26cm
アルミ製 台車・車椅子・バイク用段差解消スロープ 91cm		8cm	16cm	24cm
アルミ製 台車・車椅子・バイク用段差解消スロープ 60cm		5cm	11cm	16cm
アルミ製 台車・車椅子・バイク用段差解消スロープ 45cm		4cm	8cm	11cm

※ 荷台高に対して、必ず4倍以上の長さが必要です

## 注意事項

ここでは、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたい注意事項を記載しています。  
ご使用前に必ずお読みいただき、理解した上でご使用いただきますようお願い申し上げます。



### 警告

誤った取り扱いをすると、生命に関わる傷害や物的損害を招く恐れがあります。



### 注意

誤った取り扱いをすると、軽度の傷害や物的損害を招く恐れがあります。

## 取扱い上のご注意



### 警告

- ・道板としての用途以外には使わないでください。
- ・最大耐荷量を超える使用はしないでください。また、衝撃耐荷はかけないようにご注意ください。
- ・思わぬ事故が起きる場合がありますので、スロープを設置したままにしないでください。
- ・スロープを立てかけて放置しないでください。 ・改造や分解をしないでください。



### 注意

- ・アンカー等でスロープを固定しないでください。
- ・走行面が破損するおそれがありますので、ハイヒールや傘のような突起物で衝撃を与えないでください。
- ・ご使用後は汚れを落とし、横置きにして保管してください。
- ・屋外に長時間置きますと、砂がついたり、太陽光により高温になり、劣化しやすくなります。屋内で保管してください。
- ・二つ折りスロープを設置、収納する際に、指を挟まないようにご注意ください。

## 使用上のご注意



### 警告

- ・**車椅子でスロープを上がる時は、介助者が下から支えるようにして、前向きで上がってください。下る時は介助者が後ろ向きになり、下から支えるようにして下りてください。**
- ・使用前に、各部に異常や変形がないことを確認してください。
- ・上下、表裏を確認し、正しく設置してください。
- ・暗い場所での使用はしないでください。
- ・安定しない場所や滑りやすい場所には設置せず、設置後必ずがたつきを確認してください。
- ・スロープ中央にゆっくりと真っ直ぐに侵入し、両側のブリッジへ均等に荷重してください。
- ・スロープ上で急停止しないでください。スロープがずれて落下する恐れがあります。
- ・スロープの傾斜角度が急になると危険です。適用段差表を参考に、適した長さのスロープを使用してください。



### 注意

- ・使用時は手袋を着用してください。
- ・スロープ上を歩行する方は、滑りにくく安定した履き物を着用ください。